

herpatch

aphthae

GEL PARA ÚLCERAS BUCALES

DESCRIPCIÓN

El gel para úlceras bucales herpatch es un gel fácil de usar que forma una fuerte barrera sobre la úlcera bucal para protegerla de irritaciones y daños adicionales. La película protectora creará un microentorno ideal, reduciendo así el dolor causado por la úlcera bucal y estimulando el proceso de curación. La nueva fórmula del GEL PARA ÚLCERAS BUCALES herpatch contiene fuertes propiedades adhesivas que permitirán que el gel permanezca en su sitio durante un largo periodo de tiempo.

USO PREVISTO

El GEL PARA ÚLCERAS BUCALES herpatch está diseñado para el tratamiento de úlceras bucales y/o heridas pequeñas en la mucosa oral.

INSTRUCCIONES DE USO

- Antes de usarlo, lávese las manos con jabón y acláreselas con cuidado.
- Coloque una pequeña cantidad de gel, del tamaño de una gota, sobre el dedo y aplique el gel con cuidado sobre la úlcera bucal. Evite el contacto directo entre el tubo y las úlceras bucales y/o heridas pequeñas.
- Se formará una barrera curativa que alivia el dolor.
- Después de la aplicación, espere 30 minutos antes de comer o beber.
- Puede utilizar el producto varias veces al día hasta que la úlcera bucal esté completamente curada.
- Intente no tocarse la zona de aplicación con la lengua.

PRECAUCIONES

- Solo para uso oral.
- Utilice el producto únicamente para el tratamiento de úlceras bucales y pequeñas heridas en la boca.
- El tratamiento completo podría durar hasta 4 semanas o más (en el caso de úlceras importantes).
- Si las úlceras persisten durante más de 4 semanas, o si no hay una mejora significativa, se recomienda consultar a un profesional.
- No se recomienda el uso del producto si ha tenido una reacción alérgica a alguno de sus ingredientes.
- Consulte a un profesional si está embarazada y/o en periodo









de lactancia.

- En el caso de los niños de entre 4 y 12 años, el producto debe utilizarse bajo supervisión. En el caso de niños de menos de 4 años, consulte a un profesional antes de usar el producto. Manténgase fuera del alcance de los niños.
- No utilice el producto si está tomando otros medicamentos para el tratamiento de úlceras bucales.
- Al aplicar el producto, evite el contacto directo entre el tubo y las úlceras bucales y/o las pequeñas heridas.
- No trate más de 10 úlceras bucales al mismo tiempo. En caso de tener más, consulte a un profesional.
- Evite tragar el producto.
- Guarde el producto en un lugar seco y fresco, alejado del calor y de la luz directa del sol.
- No refrigerar.
- No lo utilice si el embalaje está dañado o abierto.
- No lo utilice después de la fecha de caducidad. Una vez abierto, se recomienda utilizar el producto en un plazo de 6 meses.

Aviso:

cualquier incidente grave que se haya producido en relación con este dispositivo debe comunicarse al fabricante y a la autoridad competente del Estado miembro en el que usted esté establecido.

SÍMBOLOS

-  Fabricante
-  Producto sanitario
-  Número de lote
-  Fecha de caducidad
-  Mantener alejado de la luz solar directa
-  Lea las instrucciones de uso
-  Mantener seco
-  No utilizar si el envase está dañado



Sylphar nv – Xavier De Cocklaan 24 – 9831 Deurle – Belgium
www.herpatch.com

CE
0197

herpatch

aphthae

GEL PARA AFTAS

PT DESCRIÇÃO

herpatch GEL PARA AFTAS é um gel fácil de utilizar, que forma uma forte barreira protetora sobre a afta. O filme protetor vai reduzir a dor causada pela afta e estimular o processo de cicatrização. A nova fórmula de herpatch GEL PARA AFTAS tem fortes propriedades adesivas, que fazem com que o gel permaneça no local durante mais tempo.

INDICAÇÕES

herpatch GEL PARA AFTAS é utilizado no tratamento das aftas e / ou pequenas feridas na mucosa oral.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

- Lavar e enxaguar as mãos antes da utilização.
- Colocar uma gota de gel num dedo e aplicar cuidadosamente na afta. Evitar contacto direto do tubo com a lesão.
- Forma-se uma barreira cicatrizante, que reduz a dor.
- Após aplicação, aguardar 30 minutos antes de beber ou comer.
- Pode ser utilizado diversas vezes ao longo do dia, até a afta estar completamente curada.
- Evitar passar a língua na zona onde o gel foi aplicado.

PRECAUÇÕES









- Apenas para utilização oral.
- Utilizar o produto apenas para o tratamento das aftas e pequenas feridas bucais.
- O tratamento completo poderá durar até 4 semanas ou mais (no caso de lesões maiores).
- Se as aftas persistirem por mais de 4 semanas, ou não houver melhorias significativas, deverá consultar um médico ou um farmacêutico.
- Não utilizar em caso de alergia a algum dos ingredientes.
- Em caso de gravidez ou amamentação, deverá consultar o médico ou farmacêutico.
- A utilização por crianças entre os 4 e os 12 anos deve ser supervisionada por um adulto. Em crianças com menos de 4 anos, consultar o médico ou farmacêutico antes da utilização. Manter fora do alcance e da vista das crianças.
- Não utilizar o produto em simultâneo com outra medicação para o tratamento de aftas.

- Ao aplicar o produto, evitar o contacto direto do tubo com a lesão.
- Não tratar mais de 10 aftas simultaneamente e, neste caso, consultar um médico ou farmacêutico.
- Evitar engolir o produto.
- Conservar em local fresco e seco, afastado de fontes de calor e ao abrigo da luz solar direta.
- Não conservar no frigorífico.
- Não utilizar se a embalagem estiver aberta ou danificada.
- Não utilizar após o prazo de validade. Consumir nos 6 meses após a abertura.

Aviso:

Qualquer incidente grave que tenha ocorrido relacionado com este dispositivo deve ser comunicado ao fabricante e à autoridade competente do Estado-membro em que o consumidor esteja estabelecido.

SÍMBOLOS

-  Fabricante
-  Dispositivo Médico
-  Número de lote
-  Data de validade
-  Manter ao abrigo da luz solar direta
-  Ler as instruções de utilização
-  Manter seco
-  Não utilizar se a embalagem se encontrar danificada.



Sylphar nv - Xavier De Cocklaan 24 - 9831 Deurle - Belgium -
www.herpatch.com

CE
0197